

Gebrauchsinformationen

für die Cross-Links (Gittertapes) 28mmx21mm

- Die **Cross-Links** sind ein nicht elastisches, selbstklebendes Tape, hergestellt aus hochwertigem **Polyester, Polyurethan** und mit einer **Acrylbeschichtung**. Durch Anwendung spezieller Anlagetechniken werden mit dem **Cross-Link** die körpereigenen Heilungsmechanismen unterstützt bzw. aktiviert, sie werden entlang des Verlaufs der Meridiane auf Schmerz-, Trigger- oder Akupunkturpunkte geklebt. Der Lymph- und Blutfluss wird in den unter der Haut liegenden Strukturen verbessert und trägt somit zu einem verbesserten Stoffwechsel bei.
- Praktische Neuerung: mit rückwärtiger Falzung zur problemlosen Ablösung von der gelben Trägerfolie.
- Das Tape ist ausgesprochen hautfreundlich, es enthält keine Medikamente oder Wirkstoffe.

Nur für professionelle Anwender.

- Vor Selbstanwendung sprechen Sie bitte mit ihrem Arzt oder Therapeuten.
- Die Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen, die Ergebnisse beruhen auf jahrelange Erfahrungen mit diesem Material.
- Verwenden Sie die **Cross-Links** nur, nachdem Sie die speziellen Anlagetechniken und Wirkweisen erlernt haben.

Warnhinweise:

Benutzen Sie das **Cross-Link** nicht auf Wunden, Verbrennungen, Schleimhäuten sowie Mund, Nase oder Augen. Während einer Schwangerschaft raten wir, das Produkt nur von Ärzten oder Hebammen anlegen zu lassen.

- Bei Anwendung von **Cross-Links** kann es in seltenen Fällen zu Kontaktreizungen oder allergischen Reaktionen kommen.
- Basenreiche Ernährung ist zu empfehlen um diese Reaktionen zu minimieren.
- Beim Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen ist das **Cross-Link** von der Haut zu entfernen.
- Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen Pflaster oder Tapeverbände, sollte das **Cross-Link** zunächst an einer kleineren Hautstelle getestet werden. Dabei ist zu bedenken, dass es nicht nur zu allergischen Sofortreaktionen, sondern auch zu Spätreaktionen (24-48 Stunden) kommen kann.

Lagerungshinweise:

- Da die Acrylat-Beschichtung temperaturempfindlich ist, können sich die Klebeeigenschaften des **Cross-Link** durch zu hohe oder zu tiefe Temperaturen verschlechtern.
- Lagern Sie das **Cross-Link** daher möglichst bei Raumtemperatur (< 23° C).
- Lagern Sie das **Cross-Link** vor Frost geschützt.
- Lagern Sie das **Cross-Link** nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Feuer, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- **Bitte halten Sie die Cross-Links von Kindern entfernt auf.**